


## AccuVein® AV400 venskanner Tips vid användning

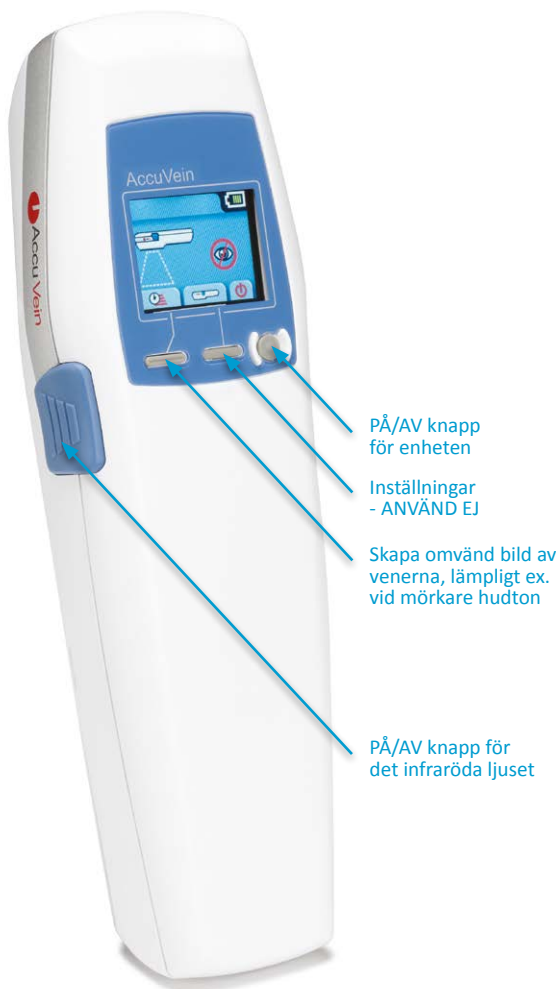

### Användar tips

- Tryck på den blåa knappen på sidan av enheten en gång för att starta skannern.
- Håll skannern ca 20 cm från huden för att tydligt se venerna.
- Kan belysa vener ned till 10 mm under hudens yta.
- Placera skannern i ett stativ om så önskas.

### Teknik för venlokalisering

- Verifiera venens läge och identifiera förgreningar och venklaffar genom att stryka över venen med fingret.
- Utgå från nationella eller lokala riktlinjer för optimal venpunktion.
- Skapa en omvänd bild av venerna genom att trycka på den vänstra knappen på skärmen. Lämpligt vid ex. mörkare hudtoner.

### Underhåll

- Förvara skannern i stativet eller laddningsstationen när den ej används.
- Batteritid, 3 timmars aktiv skanning. Laddningstid ca 3 timmar.
- Rengör med ytdesinfektion och trasa, dränk inte in apparaten.

**OBS! Rikta inte venvisningsljuset in i ögonen.**



**Top Innovation Award**  
EMS World Magazine  
October 2011

**A Top 10 Technology for**  
Healthcare Professionals  
Medical Device Developments,  
December 2010

**A Best New Product**  
for Pediatricians  
Contemporary Pediatrics