

Så byter du elektrod på din ZOLL AED Plus hjärtstartare




- 1** Placera hjärtstartaren på ett plant underlag framför dig.



- 2** Lyft av hjärtstartarens lock.



- 3** Fatta tag i den vita gummidelen och dra ur den ur kontakten.

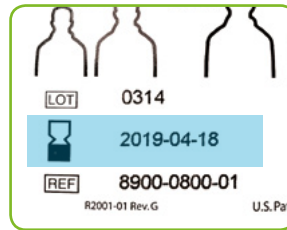

- 4** Ta ur den nya elektroden ur papplådan och kontrollera elektrodens bäst-före-datum.



- 5** Anslut den nya elektroden i kontakten. Tryck hårt.



- 6** Vik eventuellt in hörnorna på elektrodförpackningen så att den får plats under locket.



- 7** För den gula etiketten genom slitsen på locket så att bäst-före-datum syns.



- 8** Anslut locket på hjärtstartaren.

Elektroden är nu skiftad. Hjärtstartaren är nu klar för batteribyte
Vänd för vägledning

Så byter du batterier på din ZOLL AED Plus hjärtstartare



- 1 Vänd på hjärtstartaren så att baksidan är riktad uppåt.



- 2 Använd ett mynt, nyckel eller liknande för att trycka in de två låsmekanismerna så att locket kan öppnas.




- 3 Lyft bort locket och ta bort batterierna. Sätt i de nya batterierna.

Säkerställ att de placeras korrekt med polerna placerade som de ska.



Alla 10 batterier SKALL bytas ut samtidigt. Använd enbart batterier av fabrikat Duracell eller Power One. Använd inte batterier av fabrikat Panasonic, Varta, Rayovac eller andra fabrikat.

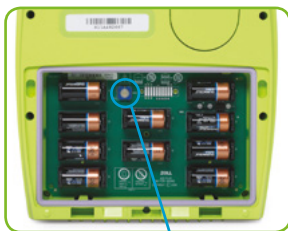

- 4 När batterierna är isatta kommer hjärtstartaren inom kort uppmana dig att trycka på batteri-återställningsknappen.

Tryck på knappen inom 15 sekunder från det att den sagt: "Om batterierna är nya, tryck då på knappen".

Om elektroden inte är kopplad kommer hjärtstartaren säga: "Anslut kabel".



- 5 Återanslut locket igen.



- 6 Kontrollera att det visas en OK-symbol ✓ i statusfönstret.

Hjärtstartaren är nu klar för användning. Batterier och elektrod har hållbarhet på 5 år.

www.zollaed.se