

AccuVein AV500 venskanner

Quick Guide



Användar tips

- Tryck på den lila knappen på sidan av enheten en gång för att starta skannern och venvisningsljuset.
- Håll skannern ca 20 cm från huden för att tydligt se venerna.
- Kan belysa vener ned till 10 mm under hudens yta.
- Placera skannern i ett stativ om så önskas.

Teknik för venlokalisering

- Verifiera venens läge och identifiera förgreningar och venklaffar genom att stryka över venen med fingret.
- Utgå från nationella eller lokala riktlinjer för optimal venpunkt.
- Skapa en omvänd bild av venerna genom att trycka på den vänstra knappen på skärmen. Lämpligt vid ex. mörkare hudtoner.

Underhåll

- Förvara skannern i stativet eller laddningsstationen när den ej används.
- Batteritid, 2 timmars aktiv skanning. Laddningstid ca 3 timmar.
- Rengör med Ytdesinfektion och trasa, dränk inte in apparaten.

OBS! Rikta inte venvisningsljuset in i ögonen.